

Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως

XonRID®

Τοπική γέλη για δερματίτιδα που προκαλείται από ακτινοθεραπεία

Το Xonrid® είναι μία τοπική γέλη που προλαμβάνει και θεραπεύει δερματικά συμπτώματα , όπως ερύθημα, φαγούρα, αίσθημα καύσου και κνησμού, που προκαλούνται από την ακτινοθεραπεία ή άλλες αιτίες.

Όταν εφαρμόζεται στις εν λόγω περιοχές του δέρματος, το Xonrid® σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ, που μειώνει την διαδερμική απώλεια ύδατος (Trans Epidermal Water Loss, TEWL) και αυξάνει την ενυδάτωση.

Το Xonrid® ενισχύει την διαδικασία επούλωσης αποκαθιστώντας τα φυσιολογικά επίπεδα ενυδάτωσης των προσβεβλημένων περιοχών του δέρματος.

Το Xonrid® μπορεί να εφαρμοσθεί στις εν λόγω περιοχές συμπεριλαμβανομένων των δερματικών πτυχών ή ρυτίδων δέρματος με ή χωρίς ελάχιστο τραυματισμό ή εκδορές.

Συστατικά

AQUA, C12-15 ALKYL-BENZOATE, CHAMOMILLA RECUTITA, GLYCERIN STEARATE, XANTHAN GUM, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ETHYLHEXYL PALMITATE, GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE, POLYACRYLAMIDE, RASPBERRY KETONE, C13-14 ISOPARAFFIN, DISODIUM EDTA, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, LAURETH-7, HYDROLYZED DNA, HYDROLYZED RNA, CAMELIA SINENSIS EXTRACT, VITIS VINIFERA EXTRACT, CALCIUM GLUCONATE.

Τρόπος χρήσεως του προϊόντος

Να εφαρμόζεται σε καθαρό δέρμα τρεις φορές την ημέρα ή όπως συστήνεται από τον ιατρό.

Εφαρμόστε το με καθαρά χέρια απευθείας στις εν λόγω περιοχές και μαλάξτε με σκοπό να δημιουργήσετε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.

Σε περίπτωση ακτινοθεραπείας, μπορείτε να εφαρμόσετε το Xonrid® για δύο ή τρεις μέρες πριν την ακτινοθεραπεία, μετά από κάθε συνεδρία και στο τέλος ενός κύκλου για όσο διάστημα απαιτείται έως της ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Μην το χρησιμοποιείτε ακριβώς πριν από την συνεδρία ακτινοθεραπείας.

Το δέρμα θα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό πριν από κάθε συνεδρία ακτινοθεραπείας.

Για να απομακρύνετε τυχόν υπόλειμμα του Xonrid®, πλύνετε απαλά την περιοχή του δέρματος με καθαρό νερό πριν από την συνεδρία της ακτινοθεραπείας.

Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις

- Η χρήση του Χονριδ® αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε ασθενή με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά του.
- Για εξωτερική χρήση μόνο. Μην το φέρνετε σε επαφή με τον βλεννογόνο ή σε επαφή με τα μάτια.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα τοπικά προϊόντα, καθώς δεν αποκλείονται πιθανές αλληλεπιδράσεις.
- Το Χονριδ® έχει μία δράση φραγμού που θα μπορούσε να επηρεάσει την in situ απορρόφηση άλλων τοπικών φαρμάκων
- Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία σοβαρών δερματικών βλαβών που μπορούν να επουλωθούν μόνο κατά δευτερεύον σκοπό (π.χ. σοβαρές πληγές με ουσιώδη και εκτεταμένη διάρρηξη του χόριου του δέρματος, χρόνια εκτεταμένες ελκώδεις πληγές, βαριά εγκαύματα, σοβαρά έλκη κατάκλισης).
- Η δερματίτιδα συνήθως αποκαθίσταται σε δύο ή τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, διακόψτε την χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν το δοχείο είναι κατεστραμμένο ή περιασπασμένο, εάν αυτό έχει φυλαχθεί σε ακατάλληλο περιβάλλον, ή μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Το Χονριδ® είναι εμπορικό σήμα της Helsinn Healthcare SA.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου.

Συσκευασία

Φιάλη που περιέχει 75 ml Χονριδ®.

Παράγεται από

Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, 9

6912 Pazzallo - Lugano - Ελβετία



Διανέμεται στην Ελλάδα από

GALENICA S.A.

Ελευθερίας 4-Κηφισιά

145 64-Αθήνα

Τηλ. 2105281700

XF 0932 012018

REF 04B

τελευταία αναθεώρηση: 02/2018



HELSINN
Integrative Care